



(6) CentoKit-19-Karton (7) weißer Klebepunkt

- CentoKit-19-Karton (6) verschließen und den weißen Klebepunkt (7) über die Lasche des CentoKit-19-Kartons (6) kleben
- CentoKit-19-Karton (6) in die GO!-Versandtasche (8) geben und diese mit dem Klebestreifen verschließen (weißen Schutzstreifen abziehen)



(8) GO!-Versandtasche (9) Lieferschein-Tasche

- die große weiße Schutzfolie von der Lieferschein-Tasche (9) entfernen und diese auf der GO!-Versandtasche (8) anbringen, ohne dabei den UN3373-Aufkleber zu verdecken (Lieferschein wird vom Kurier auf der GO!-Versandtasche angebracht)
- verpacktes CentoKit-19 an Kurier übergeben

8. TESTERGEBNIS ABRUFEN

- Das Testergebnis zu Ihrem Selbstabstrich erhalten Sie am Tag nach der Abholung bis 24:00 Uhr, das Testergebnis zu Ihrem begleiteten Abstrich per Video (Option MED) erhalten Sie bis 18:00 Uhr am Tag nach der Abholung.
- Sobald Ihr Testergebnis im Corona Test Portal bereitsteht, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
- **Hinweis:** Nach den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes sind wir dazu verpflichtet, positive Testergebnisse direkt an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

4.2 MED - BEGLEITETER ABSTRICH PER VIDEO

Buchung Abstrichtermin

Bitte gehen Sie nach Buchung Ihres Abholtermins im Corona Test Portal wie folgt vor:

- Download der Kry-App
- Registrierung bei Kry
- Terminbuchung zum begleiteten Abstrich im Zeitraum bis zu 24 Stunden vor Abholung der Probe (Bitte kalkulieren Sie ca. 20 Minuten für Test und Verpackung ein.)
- Eingabe des Gutscheincodes (Diesen finden Sie auf Ihrer Rechnung, im Anhang zu Ihrer Bestellbestätigung.)

Durchführung begleiteter Abstrich

Bitte beachten Sie, dass der gesamte Abstrichprozess per Video begleitet wird und für das geschulte Personal gut nachvollziehbar sein muss.

- Pass / Ausweis bereithalten, dessen Daten im Corona Test Portal eingegeben wurden und dessen Nummer auf dem Befund ausgewiesen werden soll
- Inhalt des CentoKit-19 bereitlegen
- Mobiltelefon senkrecht aufstellen, sodass Sie gute Sicht auf das Display und gleichzeitig die Hände für den Abstrich frei haben
- den Anweisungen des geschulten Personals folgen
- anschließend mit **7. PROBE VERPACKEN UND VERSENDEN** fortfahren

Bitte beachten Sie auch die Anleitung auf der Kry-Seite: <https://www.kry.de/centokit-19>

Bei Fragen rund um die App oder zur Videosprechstunde kontaktieren Sie bitte den Kry-Support: service@kry.de oder Tel.: 030 255 585999

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM TESTERGEBNIS:



1. Im Corona Test Portal registrieren



2.1 Abstrichzeitpunkt planen
2.2 Abholung beauftragen



3. Abstrich vorbereiten



4.1 **Selbstabstrich** nach Anleitung oder
4.2 **MED-begleiteter Abstrich** per Video, inkl. Pass- / Ausweisdaten auf dem Befund



5. Probenröhrchen bekleben



6. Probenentnahmezeitpunkt bestätigen



7. Probe verpacken und versenden




8. Testergebnis abrufen

HABEN SIE FRAGEN ZUM CENTOKIT-19?

Dann besuchen Sie uns gerne auf: centogene.com/de/covid-19/testing/hilfe-kontakt.html

oder kontaktieren Sie unseren CENTOGENE Corona Kundenservice:
Tel.: +49 (0)381 80 113-700
E-Mail: corona@centogene.com

V1_Age1_June2021

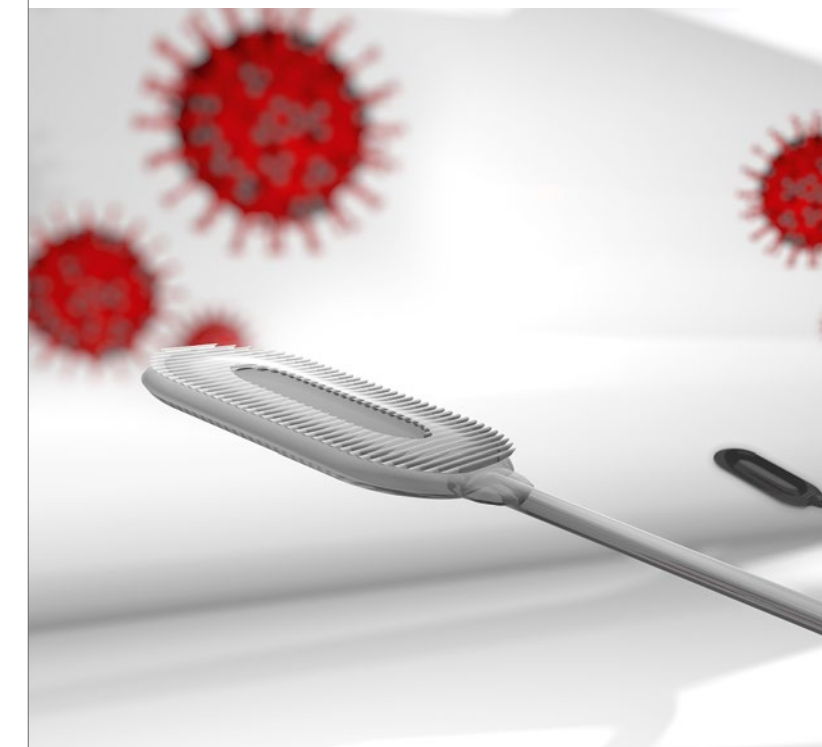

Anleitung zur Nutzung des CentoKit-19™

Das CentoKit-19 bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Abstrich für Ihren SARS-CoV-2 PCR-Test bequem zu Hause durchzuführen.

Sie können zwischen zwei Optionen wählen:

1. **Selbstabstrich** nach Anleitung
2. **MED-begleiteter Abstrich** per Video, inkl. Pass- / Ausweisdaten auf dem Befund (kostenpflichtig, im Corona Test Portal hinzubuchbar)

INHALT CENTOKIT-19™

- (1) Anleitung CentoKit-19
- (2) Gebrauchsanweisung CentoSwab-Test Kit for SARS-CoV-2
- (3) CentoSwab-Test Kit for SARS-CoV-2 (Abstrichset mit Teststäbchen und Probenröhrchen)
- (4) Karte mit Probennummer (QR- und Barcode)
- (5) Safetybag
- (6) CentoKit-19-Karton
- (7) weißer Klebepunkt
- (8) GO!-Versandtasche
- (9) Lieferschein-Tasche

Nachfolgend beschreiben wir die Schritte für Ihren PCR-Test mit Selbstabstrich zu Hause für die Option „Selbstabstrich nach Anleitung“. Bitte planen Sie ca. 20 Minuten für den gesamten Prozess ein.

Wenn Sie Ihr CentoKit-19 mit der Option „MED – begleiteter Abstrich per Video, inkl. Pass- / Ausweisdaten auf dem Befund“ nutzen möchten, beachten Sie bitte darüber hinaus die Hinweise unter **4.2 MED – BEGLEITETER ABSTRICH PER VIDEO**.

Hinweis: Diese Option wird ausschließlich für das CentoKit-19 Single angeboten und ist kostenpflichtig im Corona Test Portal hinzubuchbar. Sie benötigen dafür ein Mobiltelefon oder Tablet mit Kamera.

1. IM CORONA TEST PORTAL REGISTRIEREN

Um das CentoKit-19 nutzen zu können, registrieren Sie sich bitte im Corona Test Portal unter corona.centogene.com.



2.1 ABSTRICHZEITPUNKT PLANEN

- Login im Corona Test Portal
- „Ich habe bereits ein CentoKit-19 vorliegen und möchte dieses nutzen.“
- „Weißer Karton“ auswählen
- „Ich möchte eine Abholung bei mir zu Hause beauftragen.“
- CentoKit-19-Nummer eingeben (siehe Barcode auf dem CentoKit-19-Karton (6))



(6) CentoKit-19-Karton

- Auswahl der gewünschten Option zur Nutzung Ihres CentoKit-19:
1. Selbstabstrich nach Anleitung oder
2. MED – begleiteter Abstrich per Video, inkl. Pass- / Ausweisdaten auf dem Befund
- Person auswählen, die das CentoKit-19 nutzen wird (nur bei Option „MED“)
- Pass- / Ausweisdaten eingeben (nur bei Option „MED“)
- Rechnungsadresse eingeben (nur bei Option „MED“)
- Probennummer auswählen, die abgeholt werden soll

2.2 ABHOLUNG BEAUFTRAGEN

- Abholadresse eingeben
- Abholtermin auswählen
- Bestellung überprüfen und Abholung beauftragen

3. ABSTRICH VORBEREITEN

- Bitte beachten Sie, dass die Schritte 4.1 bis 7 im Zeitraum von bis zu 24 Stunden vor Abholung der Probe durchzuführen sind.
- 15 Minuten vor dem Rachenabstrich bitte nicht essen oder trinken, Zähne putzen, Kaugummi kauen oder rauchen.




- Für die Option MED – begleiteter Abstrich per Video bitte mit **4.2 MED – BEGLEITETER ABSTRICH PER VIDEO** auf der Rückseite fortfahren.

4.1 ABSTRICH DURCHFÜHREN



- Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben in der beiliegenden Gebrauchsanweisung CentoSwab Test Kit for SARS-CoV-2 (2).

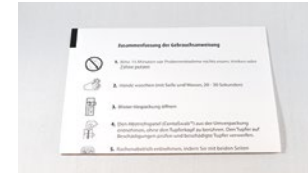


(2) Gebrauchsanweisung CentoSwab-Test Kit for SARS-CoV-2



(3) CentoSwab-Test Kit for SARS-CoV-2

5. PROBENRÖHRCHEN BEKLEBEN

- Karte mit Probennummer (4) bereitlegen
- Barcode- und QR-Code-Aufkleber wie folgt aufkleben:

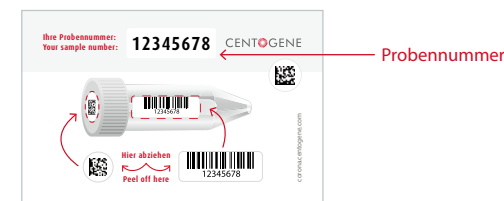

(4) Karte mit Probennummer

- Probe(n) in den Safetybag (5) geben und erst verschließen, wenn keine weiteren Proben hinzugefügt werden (**der Safetybag kann nicht mehr geöffnet werden**)



(5) Safetybag

- Für weitere Proben Vorgang wiederholen (nur bei CentoKit-19 Family)

6. PROBENENTNAHMEZEITPUNKT BESTÄTIGEN

Um Ihr Testergebnis erhalten zu können, muss im Corona Test Portal die Probennummer aktiviert und damit der Zeitpunkt für die Probenentnahme bestätigt werden:

- Login im Corona Test Portal
- „Ich habe bereits ein CentoKit-19 vorliegen und möchte dieses nutzen.“
- „Weißer Karton“ auswählen
- „Ich habe bereits eine Abholung beauftragt und möchte meine Probennummer aktivieren.“
- Person auswählen, für die die Probennummer aktiviert werden soll
- Probennummer eingeben
- Für weitere Proben Vorgang wiederholen (nur bei CentoKit-19 Family)

7. PROBE VERPACKEN UND VERSENDEN

- Safetybag (5) in den CentoKit-19-Karton (6) legen